
Tagasilöögiklapi komplekt. Toote kirjeldus.



Toote kirjeldus

Tagasilöögiklapi komplekte kasutatakse meditsiiniliste gaaside tsentraalsüsteemides tagamaks, et gaas ei voolaks seadmetest ja torudest läbi tsentraalse gaasisüsteemi tagasi. See on äärmiselt oluline näiteks sellisel juhul, kui laborites võetakse meditsiinilist õhku meditsiiniliste gaaside tsentraalsüsteemist.

Tagasilöögiklapi komplekt koosneb standardsest voolusuuna noolega tähistatud tagasilöögiklapist, lukustatavatest meditsiinilistest sulgeventiilidest sisse- ja väljavoolule ning gaaspetsiifilisest meditsiinilisest kiirliitmikust. Selline konstruktsioon muudab tagasilöögiklapi väga kergesti kontrollitavaks. Lisaks saab kiirliitmikku kasutada rõhu kontrollimiseks ning lekkeproovide tegemiseks, ühendades selle manomeetriga. Tänu kiirliitmikule on võimalik ka gaasiproovide võtmine. Tagasilöögiklapi komplekti saab samuti tellida gaaspetsiifilise kiirliitmikuga kas instrumendiõhule või meditsiinilisele hapnikule. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Linde Healthcare'iga.

Tehnilised andmed

Avarõhk	6 kPa (0,06 bar)
Surveklass	PN16

Kasutus- ja hooldusjuhised

Tagasilöögiklapi kontrollimiseks suletakse sisendventiil. Seejärel laske tagasilöögiklapi ja sisendventiili vahelt meditsiinilise kiirliitmiku abil rõhk välja. Ühendage testimisseadmestik ja veenduge, et tagasilöögiklapp allavoolu ei leki.

Kontrollige lisaks, et tagasilöögiklapp laseb gaasi voolu suunas läbi. Pärast ülevaatust AVAGE SISENDVENTIIL.

Tagasilöögiklapi komplekti tuleb lekketestida paigaldamisel ja seejärel iga-aastaselt. Lekete või muude vigade tekkimisel vahetage komponent välja. Seejärel tehke lekketest.

Toode ei tohi sattuda kontakti õlide, rasvade ega muude ummistavate ainetega.

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tootekoodid

Tootekood	Nimetus	Toruliitmik	Pikkus (ligikaudne)
318325	Tagasilöögiklapp, hingamisõhk DN15	15/22 mm	415 mm
318324	Tagasilöögiklapp, hingamisõhk DN25	28 mm	505 mm
318331	Tagasilöögiklapp, hingamisõhk DN40	42 mm	935 mm

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.